


Как проводить тесты Актим ПРОМ и Актим Партус

Подозрение на разрыв
плодной оболочки



Забор образца

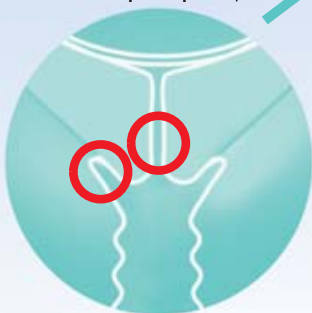

Введите конец тампона во влагалище по направлению к заднему своду влагалища, пока не почувствуете сопротивление. Альтернативно проба может быть взята во время осмотра из шейки матки. Тампон должен оставаться во влагалище в течение 10-15 секунд, чтобы он впитал достаточное количество вагинальных выделений

Подозрение на
преждевременные схватки



Забор образца



Полиэфирным тампоном забирают цервикальный секрет, оставляя тампон в зеве шейки матки на 10-15 секунд, чтобы он впитал достаточное количество отделяемого.

Экстракция

Экстрагируйте пробу с тампона, энергично вращая его в течение 10-15 секунд в пробирке с раствором для экстракции.

Погружение

Погрузите желтую зону полоски в экстрагированную пробу и не вынимайте её, пока в зоне результата не появится фронт жидкости. Извлеките полоску из жидкости и положите ее горизонтально.

Считай
результат

Результат теста виден через 5 минут.

Результат

Если появляются две голубые линии, линия теста и контрольная линия, результат теста положительный. Если через 5 минут появляется только одна голубая линия, контрольная линия, результат теста отрицательный.